

## Warm-Keepit HH108MD1

【特徴】急速冷却が必要な用途に最適な機種です。

85 で調乳したミルクを短時間冷却し、そのまま設定温度で保温  
(温度:0.1 単位デジタル表示 / 時間:分:秒)

ノロウイルス対策などに湯冷ましを使わないで急速冷却をお薦めします。

機能 / 強制冷却 / 保温保持 / その他の補助機能(約80 で瓶を加熱殺菌)

哺乳瓶2本(温度82 の場合約15分で42 まで空冷)

(19 の水2Lに入れた条件と同じ冷却能力です。)

【使用方法】

調乳した哺乳瓶を本機に入れて、電源スイッチをON。

約15分ほどで冷却し、保温に切り替わります。

(哺乳瓶はガラス製を使用して下さい。)

哺乳瓶を取り出して電源OFF。

【製品仕様】

使用電源	AC100V
消費電力	40W「保温時の最大」
本体寸法	W195×D220×H186(有効高さ230)mm
庫内寸法	W82×D148×H102
有効入数	～64×2本
使用周囲温度	12～32
温度設定範囲	32～58 設定可能温度 室温プラス5～55
温度設定単位	0.1
温度表示単位	0.1
温度設定方式	デジタル設定方式
温度制御方式	PID制御方式 / SSR出力採用
加熱方式	低容量分散式ヒーター
庫内温度分布	±1.5
本体材質	板金 / 粉体焼き付け塗装
本体カラー	ホワイト
本体重量	8Kg
コード長	約2m(3Pプラグ)
付属品	トレイ 1
日本製	



## Accessory

HH108MD専用トレイ

材質 ステンレス製



【用途】哺乳瓶 / その他の保冷

KEEPIT 株式会社 生田産業 キープイット販売部

TEL 0268-35-1104 or 1536 FAX 0268-35-1561

〒386-0407 長野県上田市長瀬3951-1

e-Mail ikutan@coral.ocn.ne.jp